

ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE

Prise en charge de la douleur



freedom5

PCA à usage unique




Value Life


Mode d'emploi freedom5 PCA à usage unique




- 1 Remplir une seringue stérile**
(non fournie) avec 50 mg de morphine dilué dans 50 ml de sérum physiologique.

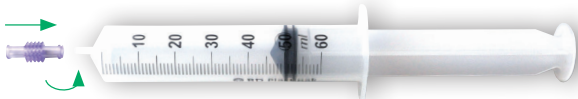

- 2 Transférer lentement la solution**
dans la cartouche de la PCA avec le raccord F/F en injectant 46ml de solution morphinique (50 ml - 4ml prévus pour la purge de la ligne).

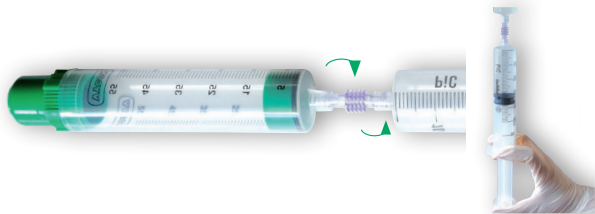

- 3 Retourner l'ensemble**
Purger la cartouche de la PCA et débuller en aspirant avec la seringue. Maintenir la seringue vers le haut pour aspirer l'air.

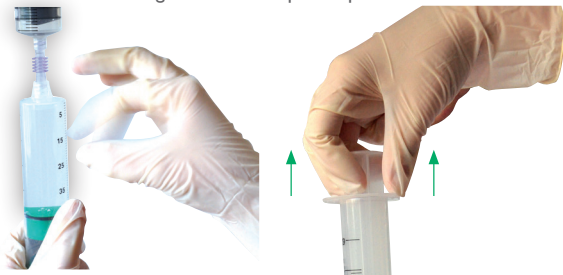


- 4 Introduire la cartouche dans le corps PCA**
Visser fermement pour positionner la graduation de la cartouche dans la fenêtre de lecture du corps.



- 5 Exercer une pression sur le bouton poussoir vert**
Relâcher pour amorcer le dispositif. Attendre 1 à 2 minutes.



- 6 Purger**
la ligne principale et la voie latérale du prolongateur PCA avec les 4 ml de morphine restant dans la seringue LL.

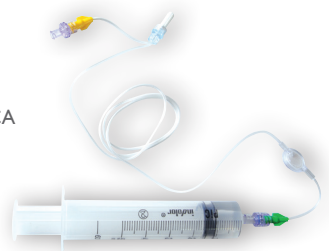


- 7 Exercer une 2^{ème} pression sur le bouton poussoir vert**
pour vérifier la fonctionnalité de la PCA.



- 8 Raccorder le prolongateur**
au corps de la PCA.



- 9 Introduire les pattes du couvercle de sécurité**
dans les encoches du corps de la PCA jusqu'à son verrouillage caractérisé par un 'clic' de fin de course.

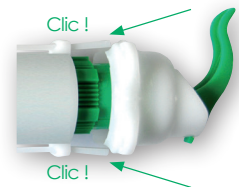

- 10 Compléter les informations**
Compléter l'étiquette signalétique autocollante puis la coller sur le corps de la PCA.



Précautions d'emploi



Vérification régulière du point de ponction.
S'assurer que le patient a compris l'utilisation et le fonctionnement de la PCA Vygon. Ne pas recharger plus de deux fois.

La PCA Vygon Freedom 5 est un dispositif mécanique indiqué pour l'analgésie contrôlée par le patient. Dispositif médical stérile de classe IIb ; conforme à la directive 93/42/CEE, selon l'annexe II. Certification établie par le GMED, organisme notifié n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon. Avant toute utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

Pour plus d'informations, contactez-nous : questions@vygon.com

Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre d'information uniquement et n'ont pas de valeur contractuelle.

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE

Reception: +33 (0)1.39.92.63.63

Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81 – Fax.: +33 (0)1.39.90.29.37

Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15 – Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44

VYGON
www.vygon.fr